



# viamobil V15<sup>®</sup>

Anbauanweisung  
*Mounting instructions*

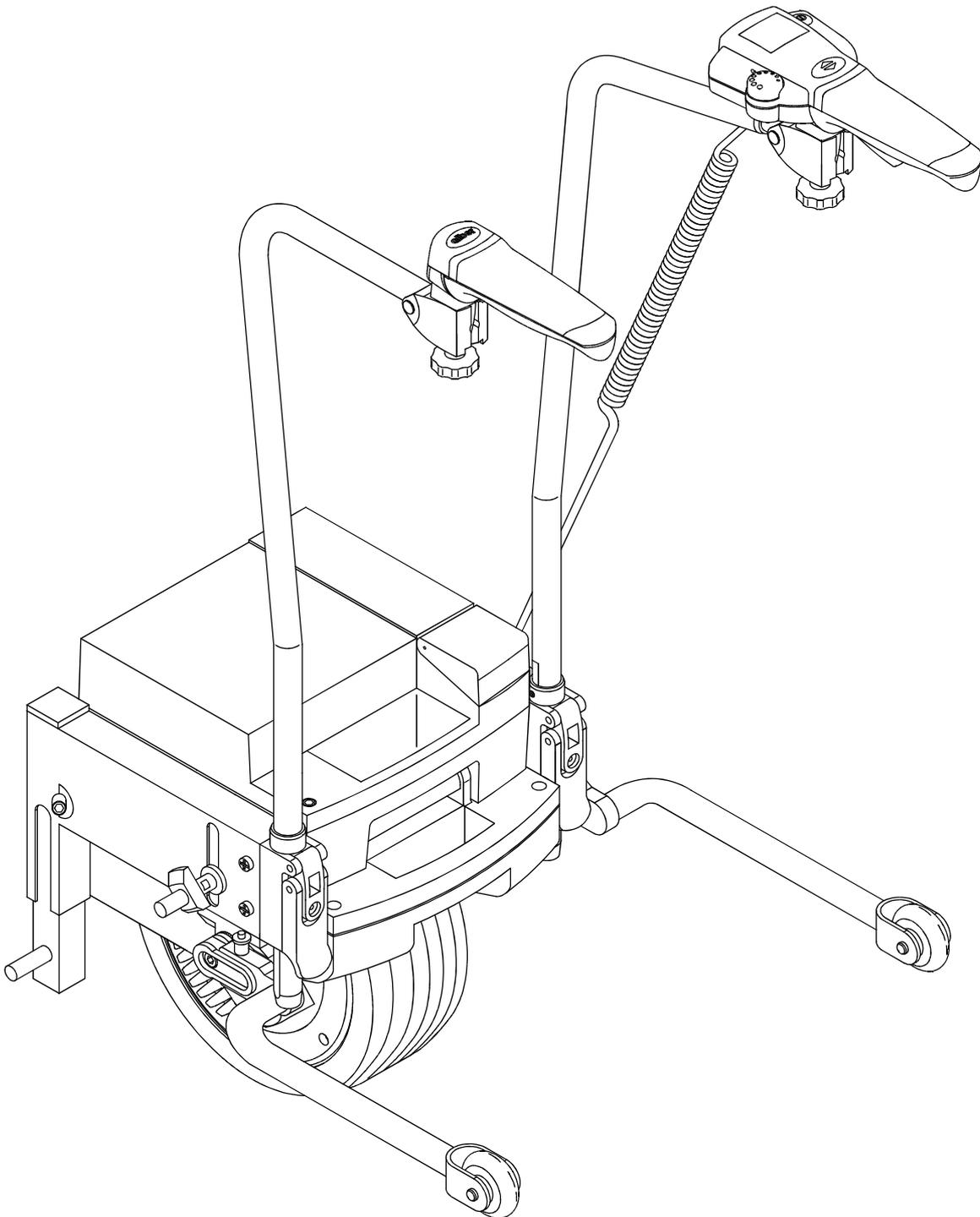


**Mitgelieferte Anbauteile**  
**Supplied parts**

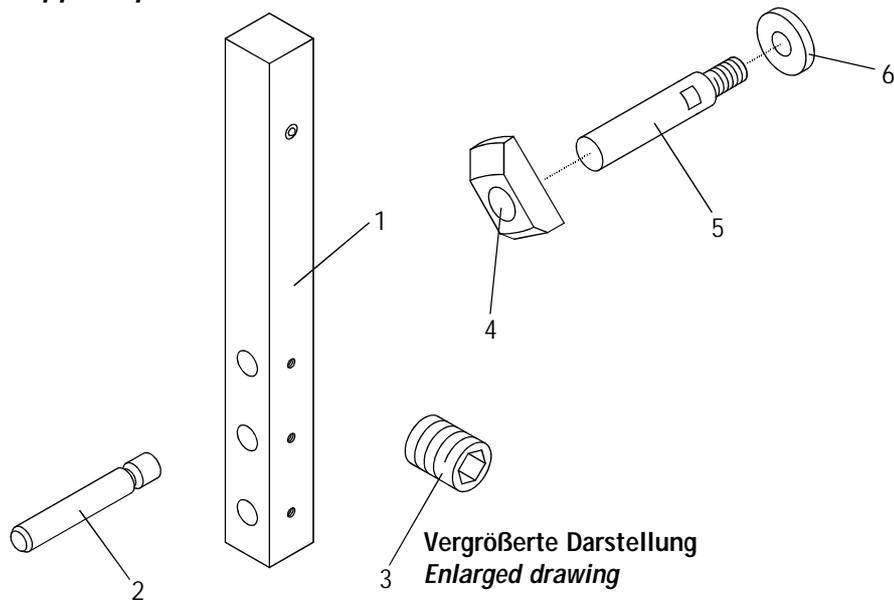


- 1 = Schiene  
Plate
- 2 = unterer Bolzen  
Lower bolt
- 3 = Gewindestift M 5x5  
Threaded pin M 5x5
- 4 = Fixierung  
Fixing bracket
- 5 = oberer Bolzen  
Upper bolt
- 6 = Unterlagscheibe  
Plain washer

**Montage**  
**Mounting**

1

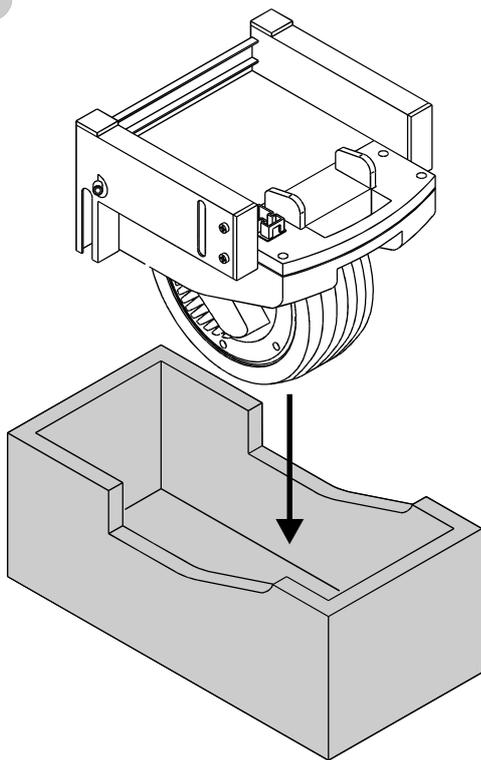


2

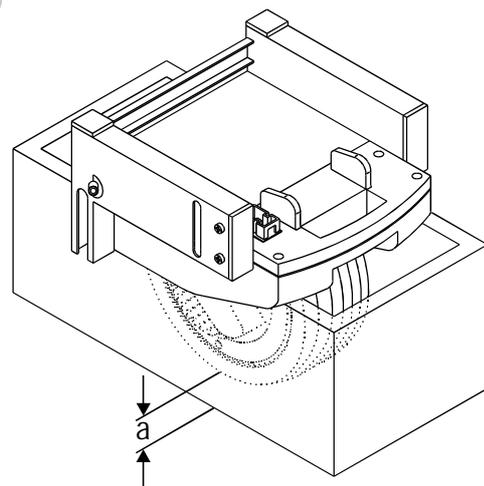


Setzen Sie das viamobil in den Montagekarton (Teil der Verpackung). Der korrekte Abstand zum Boden von  $a=15\text{mm}$  ergibt sich hierdurch automatisch.


Put the viamobil into the cardboard box provided (part of the packing). The correct space of  $a=15\text{mm}$  is given automatically.

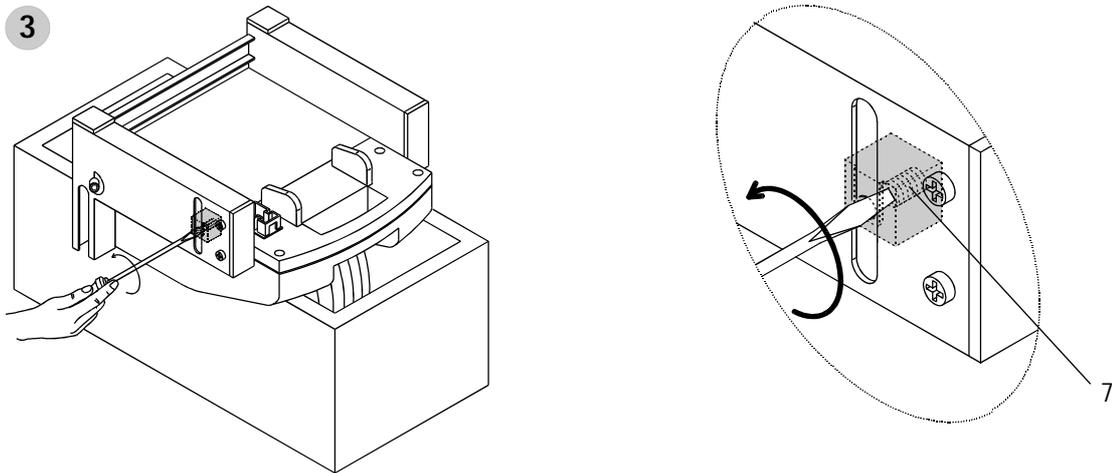


Lösen Sie den im Verschiebeteil befindlichen Gewindestift [7]; das Verschiebeteil muß voll beweglich sein.  
*Unscrew the threaded pin [7] inside the adjustent plate. The adjustment plate should be completely movable.*

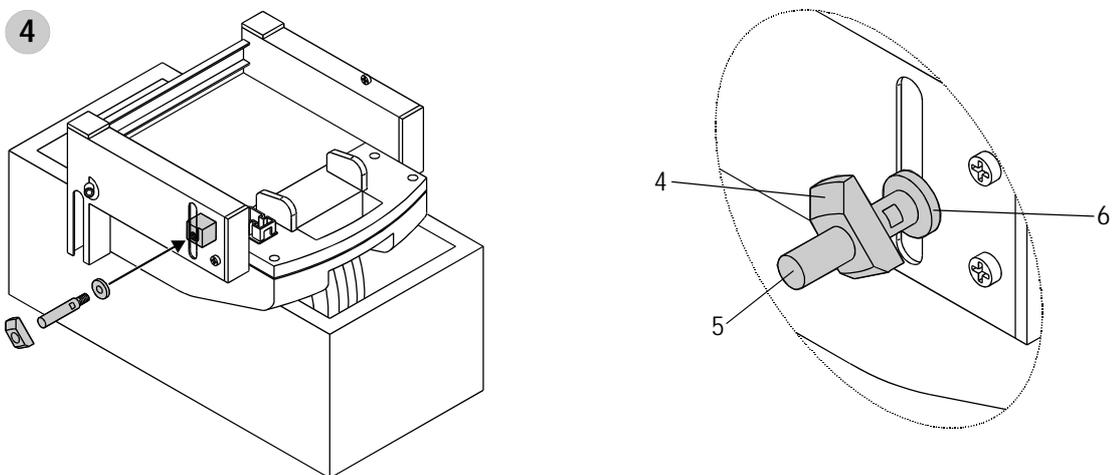

Montieren Sie den oberen Bolzen (Teile [4], [5] und [6]), ziehen Sie die Teile jedoch noch nicht fest an. Die Fixierung erfolgt erst später am Rollstuhl.  
*Mount the upper bolt [parts [4], [5] and [6]], but do not tighten these parts. The fixing will be made later at the wheelchair.*

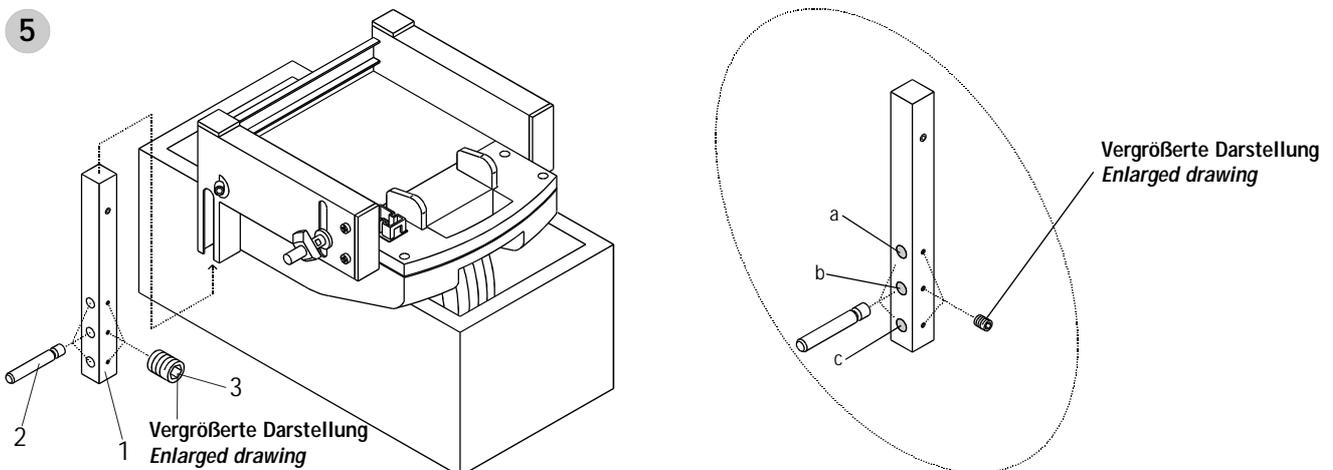


Montieren Sie den unteren Bolzen (Teile [1], [2] und [3]). Die Lochposition (a,b oder c) richtet sich nach der am Rollstuhl angebauten Halterung. Schieben Sie die montierte Schiene [1] anschließend in das Gehäuse des viamobil.  
*Mount the lower bolts (parts [1], [2] and [3]). The hole position (a,b, or c) is given from the holding device, mounted at the wheelchair. Afterwards put the mounted plate [1] into the viamobil housing.*

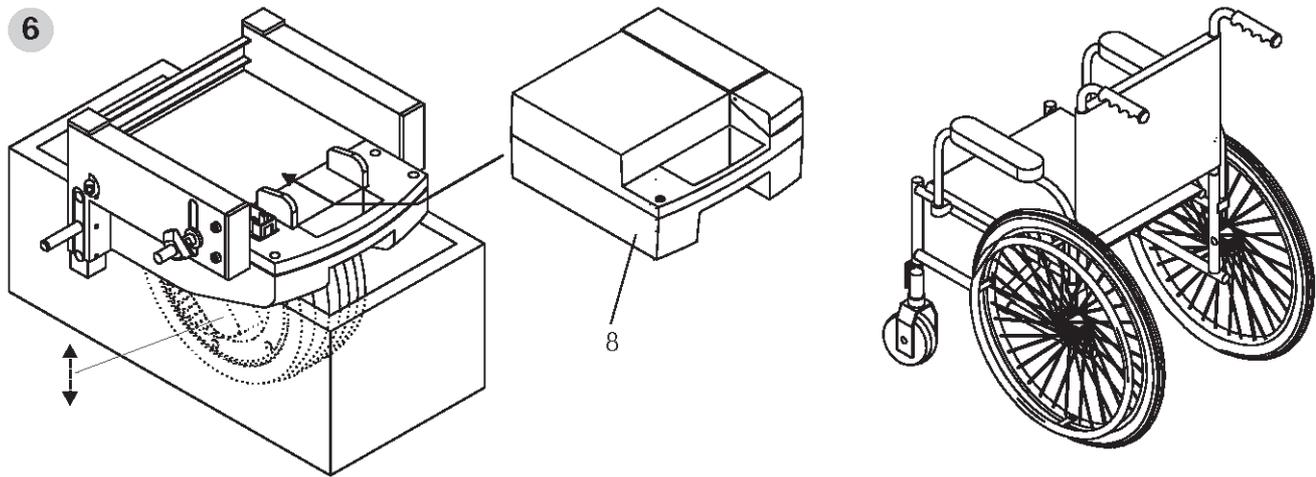


Legen Sie den Batterie-Pack in das viamobil und prüfen Sie die Funktion des viamobil-Antriebsrades (korrektes Heben bzw. Senken). Prüfen Sie ebenfalls den korrekten Luftdruck aller 4 Räder des Rollstuhls (Herstellangaben beachten).

*Put the battery on the viamobil and check the function of the of the drive wheel (correct moving up and down). Check also the air pressure of all 4 wheelchair wheels (pay attention to the manufacturers specifications).*

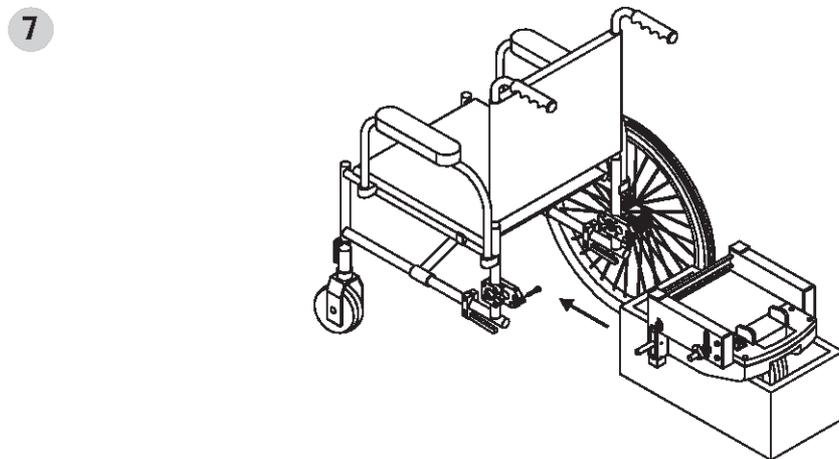


Schieben Sie das viamobil (auf der Kartonage) unter den Rollstuhl.

*Push the viamobil (in the provided cardboard box) under the wheelchair.*

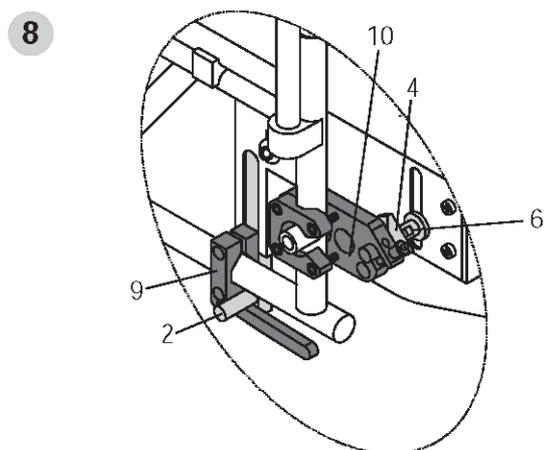

Anzugsmoment der Schraube  
M8 x 20 [11]: 10 Nm  
*Tightening torque of the  
screw M8 x 20 [11]: 10 Nm*

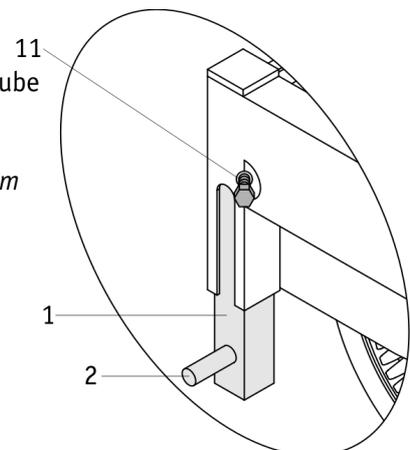

Mitteln Sie das viamobil unter dem Rollstuhl und justieren Sie:

- den unteren Bolzen [2] in der unteren Aufnahme [9]
- den oberen Bolzen [6] in der oberen Aufnahme [10]
- die Fixierung [4] zur oberen Aufnahme [10]



Ziehen Sie nach erfolgter Justierung alle Elemente fest an (die Fixierung der Schiene [1] erfolgt über die Schraube [11]).

*Centre the viamobil under the wheelchair and adjust:*

- the lower bolt [2] in the lower bracket [9]
- the upper bolt [6] in the upper bracket [10]
- the fixing bracket [4] to the upper bracket [10]

*Tighten all elements after you have adjusted them (tightening of plate [1] is made with screw [11]).*


9

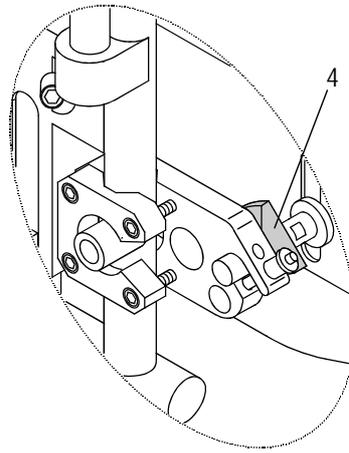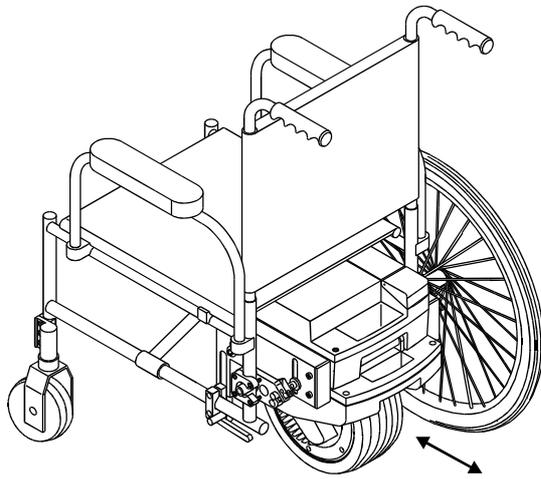


Heben Sie den Rollstuhl zusammen mit dem viamobil aus der Kartonage. Prüfen Sie durch mehrfaches Ein- und Ausfahren des viamobil unter den Rollstuhl dessen Gängigkeit. Bei Schwergängigkeit oder zu hohem seitlichen Spiel müssen die Fixierungen [4] nochmals neu justiert werden.

*Lift the wheelchair together with the viamobil out of the cardboard box. Check the drive under the wheelchair, respectively the attachment out of the wheelchair. If this driving is sluggish or the movement (left/right) is too much, you have to adjust the fixing brackets [4] again.*


**Montage der Kippstützen (optionales Zubehör)**  
**Mounting of the tilt supports (optional accessory)**

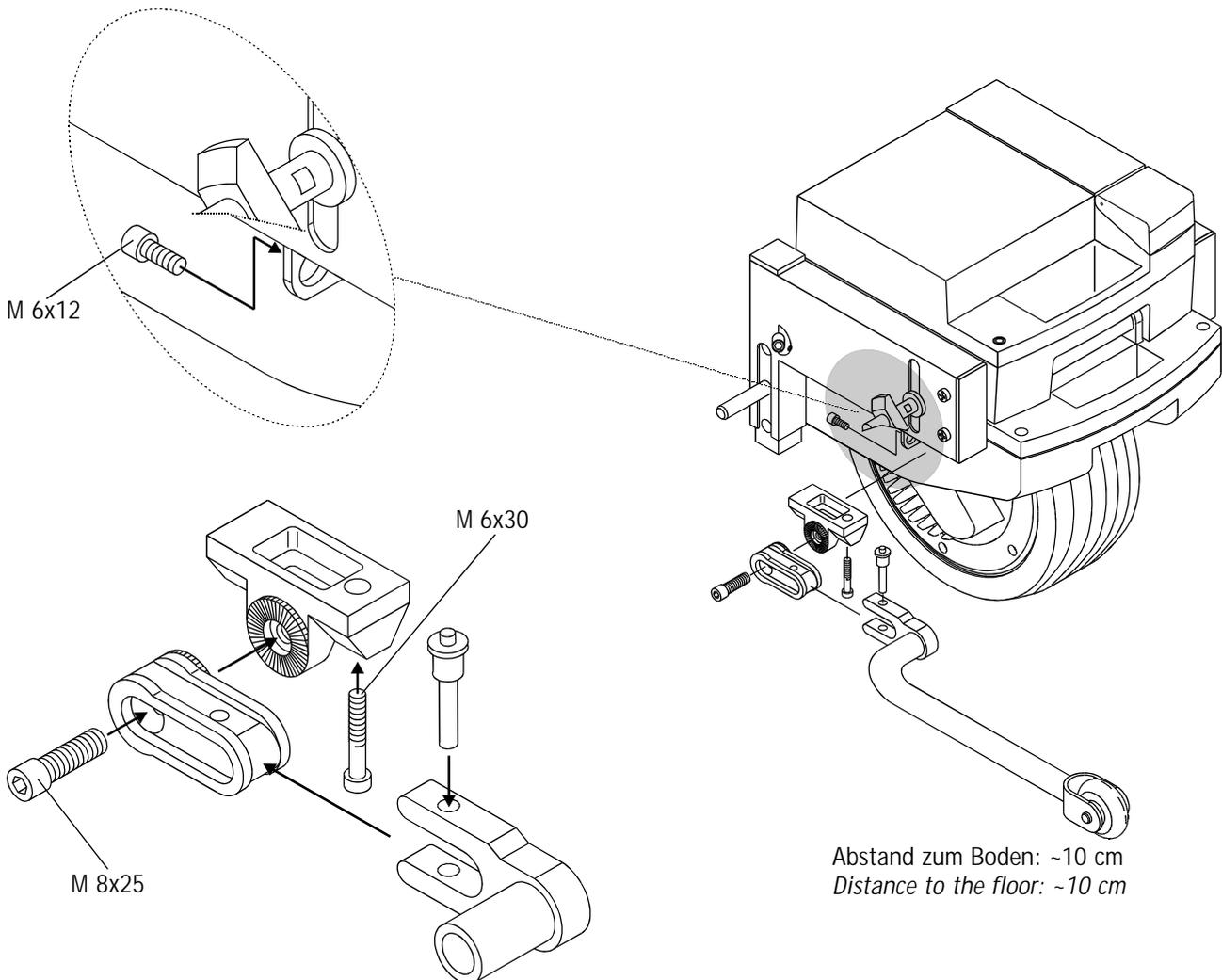

**Montage des Bediengeräts am Rollstuhl**  
*Mounting of the control unit at the wheelchair*

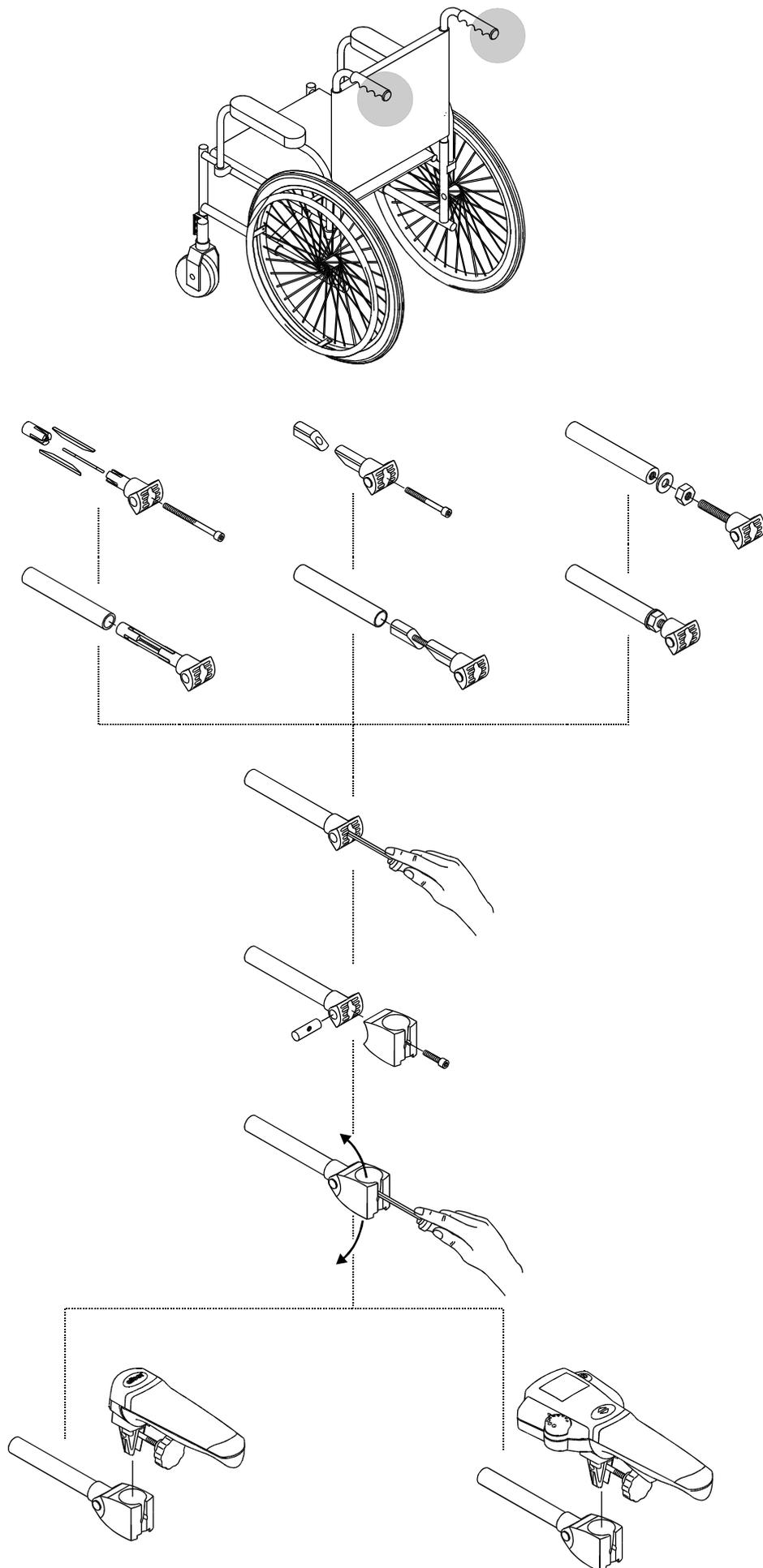

**Montage der Zusatzschiebegriffe (optionales Zubehör)**  
**Mounting of the additional handgrips (optional accessory)**

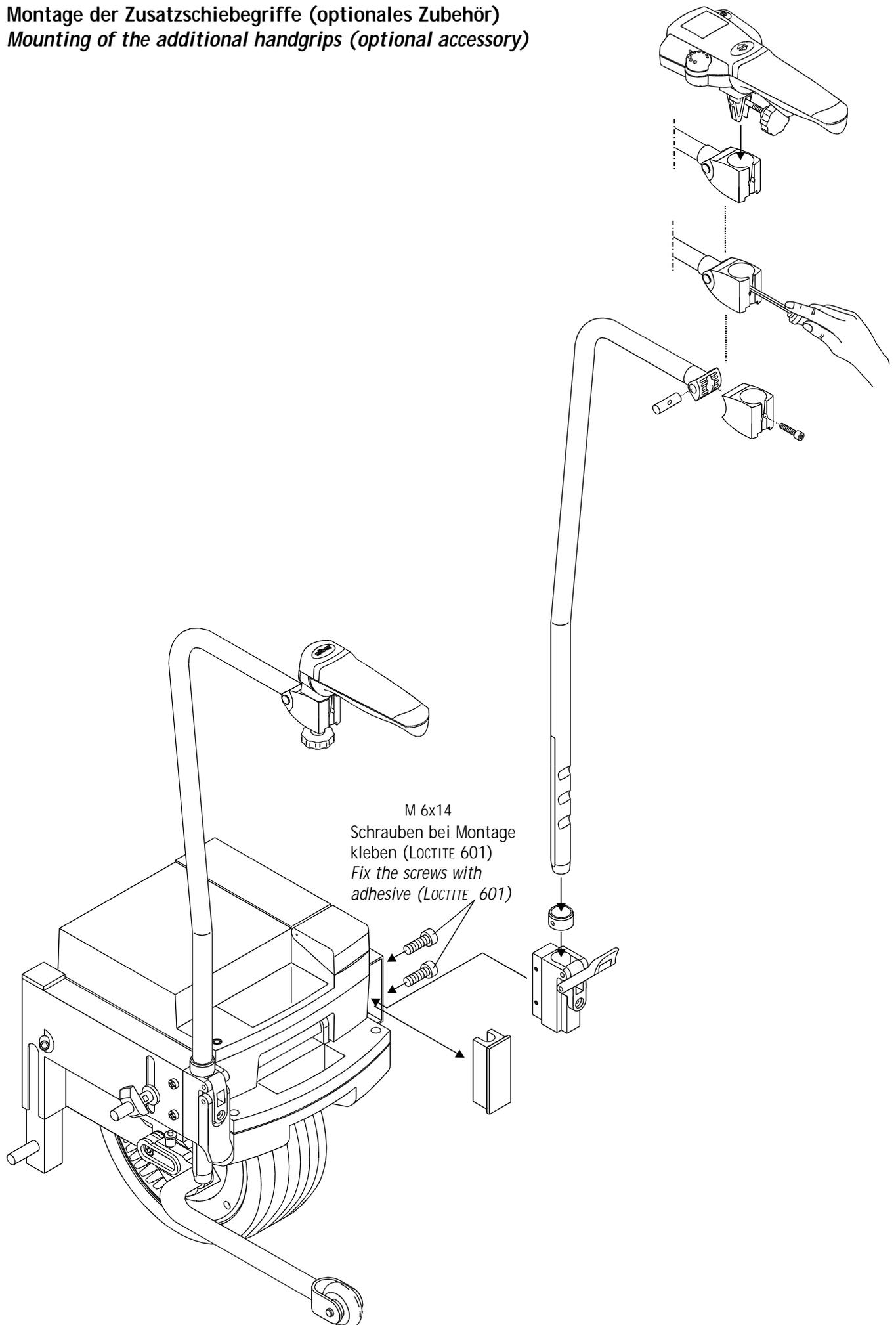

Ulrich Alber GmbH  
Vor dem Weißen Stein 21  
D - 72461 Albstadt-Tailfingen  
Telefon: (07432) 2006-0  
Telefax: (07432)2006-299  
email: [info@alber.de](mailto:info@alber.de)  
Internet: [www.alber.de](http://www.alber.de)

